



Nombre

## Discos Protectores Multiuso

### Protective Discs

Código externo

20.07.DP

Código interno

82.DP

Descripción

Pueden ser colocados en diversas zonas de fricción existentes entre el pie y el calzado, disminuyendo el roce que esto provoca al caminar, y evitando la formación de ampollas e irritaciones. Su diseño se adapta a cualquier tipo de calzado.

Modo de acción

La consistencia del gel permite que los discos se adhieran al calzado, amortiguen y protejan al pie, evitando irritaciones en la piel producto del roce del calzado al caminar.

Materialidad

Elaborados en gel de poliuretano, elastómero de gran elasticidad, capacidad de amortiguación y aislación térmica.

Tabla de tallas / Código de barras

**UNIVERSAL** 7798162420196

Instrucciones de uso

El protector debe adherirse al calzado, no a la piel.

1. Retirar el producto a utilizar de la película protectora.
2. Colocar el disco en la zona del calzado que se requiera.
3. Presionar hasta que quede correctamente adherido.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Producto no estéril, no utilizar directamente sobre heridas abiertas o zonas infectadas.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar. Secar con toalla para quitar el exceso de agua. Almacenar en lugar protegido de la humedad. Matener alejado de oxidantes y ácidos.



Patologías

- \* Irritaciones cutáneas del pie
- \* Callosidades
- \* Laceraciones

Composición

100% Gel de poliuretano

Productos relacionados

PC-TC-TEA-TER-PS-PCH-PGL-OS-PD-PT-TM-AD-SA-KP-TA-AG-AI-DG-JU-PM-STT

Envase	Blisters plásticos
Cantidad	6 unidades
Color	Transparente
NCM	3926.90.90
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	China

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global