



Nombre

Plantilla con soporte de arco

Insoles with arch support

Código externo

2001-PSA

Código interno

P821SPSA

Descripción

Brinda amortiguación y alta absorción de impacto. Ideal para caminar, correr y estar de pie gracias a su liviandad y comodidad, aliviando la fatiga del pie y orientada a personas con fascitis plantar. Gracias a su materialidad proporciona un soporte robusto para el arco alto y ofrece una estructura en el talón para una máxima amortiguación y manteniendo la estabilidad del pie.

Modo de acción

Gracias a una combinación de soporte estructural, amortiguación efectiva y comodidad es una herramienta esencial para el bienestar del pie. Ayuda a mejorar la experiencia de caminar, reduciendo el dolor y aumentando la comodidad en cada paso.

Materialidad

Debido al uso de PU de alta durabilidad son resistentes y están diseñadas para reducir el dolor y aumentar el confort durante el uso prolongado. La almohadilla metatarsal ofrece amortiguación adicional al antepie y el TPU provee soporte reforzado al arco que proporciona una estabilidad adicional y ayuda a mantener la alineación adecuada del pie, reduciendo la tensión en pies, tobillos y rodillas. Mientras que el pad de gel, alivia el estrés y absorbe impactos del talón.

Tabla de talles / Código de barras

Según número de calzado

S	36 - 38	7798162420554
M	39 - 41	7798162420561
L	42 - 45	7798162420578

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Verificar el talle y recortar a lo largo de las líneas superiores de ser necesario.
2. Introducir la plantilla en el calzado con la cara de gel hacia abajo.
3. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Quitar la plantilla si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida. Se recomienda renovar la plantilla cada seis meses. Esto puede variar de acuerdo a la frecuencia de uso del producto. Para su correcto uso, se sugiere reemplazar la plantilla regular del calzado por la plantilla sport.

Envase	Blister plástico
Cantidad	1 par
Color	Gris
NCM	6406.90.20.900K
Peso sin envase	0,135 kg.
Peso con envase	0,2 kg.
Volumen con envase	
Industria/Origen	China

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar. Secar con toalla para quitar el exceso de agua. Almacenar en lugar protegido de la humedad.



Patologías

Composición

Capa superior: 100% Poliéster
Capa media: 100% Espuma de PU
Capa inferior: 100% Gel de poliuretano
Capa inferior: 100% TPU

Productos relacionados

PC-TC-TEA-TER-PD-PCH-PGL-OS-PT-SA-AD-DP-KP-TA-AG-AI-DG-JU-PM-STT

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

ficha_de_producto_PSA_v.1