



DISFRUTÁ TU CAMINO



Nombre

Plantilla Sport Pro

Sport Pro Insoles

Descripción

Las plantillas de 3/4 de largo ofrecen libertad de movimiento para los dedos, adaptándose cómodamente a la mayoría del calzado. Diseñadas con soporte y confort para el arco, brinda una ventaja adicional con su almohadilla de triple equilibrio: comodidad, soporte para el arco y amortiguación antichoque. Además, el talón de gel asegura una sensación de confort y proporciona una eficaz absorción de impactos. Su soporte de tela ayuda a controlar la humedad, absorbiendo la sudoración.

Código externo

2001-PSP

Código interno

P821SPSP

Modo de acción

El gel amortigua y ayuda a absorber el impacto al caminar. Debido a la almohadilla triple equilibrio y el talón de gel, son ideales para diversas actividades deportivas. Su tamaño permite que los dedos de los pies se muevan libremente y se ajustan cómodamente a la mayoría del calzado.

Materialidad

Fabricadas con espuma de PU, son altamente resistentes y están diseñadas para aliviar el dolor y mejorar el confort durante su uso prolongado. La hoja de soporte de arco de gel TPE (Elastómero Termoplástico) proporciona un adecuado soporte para el arco del pie y distribuye la presión de manera equilibrada. Además, el gel en el talón actúa como un eficaz amortiguador de impactos, lo que las hace ideales para cualquier actividad deportiva.

Tabla de tallas / Código de barras

Según número de calzado

S	36 - 40	7798162420530
L	41 - 45	7798162420547

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Verificar el talle y recortar a lo largo de las líneas superiores de ser necesario.
2. Introducir la plantilla en el calzado con la cara de gel hacia abajo.
3. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Quitar la plantilla si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida. Se recomienda renovar la plantilla cada seis meses. Esto puede variar de acuerdo a la frecuencia de uso del producto. Para su correcto uso, se sugiere reemplazar la plantilla regular del calzado por la plantilla sport.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar. Secar con toalla para quitar el exceso de agua. Almacenar en lugar protegido de la humedad.



Composición

Capa superior: 100% Poliéster
Capa media: 100% Espuma de poliuretano
Capa inferior: 100% Gel de poliuretano

Patologías

Productos relacionados

PC-TC-TEA-TER-PD-PCH-PGL-OS-PT-SA-AD-DP-KP-TA-AG-AI-DG-JU-PM-STT

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Frágata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global