



Nombre

## Protector para callos gel Gel Corn Cushions

Código externo

2003-CG

Código interno

P821SCG

Descripción

Diseñado para ser colocado entre el pie y el calzado, donde se presenten callosidades, disminuyendo el roce que esto provoca al caminar. La amortiguación que proporciona ayuda a disminuir la presión en la zona y previene las molestias generadas por el contacto con el calzado.

Modo de acción

El material de gel proporciona amortiguación, evitando la fricción entre el pie y el calzado. La cara autoadhesiva permite la correcta adhesión al pie. El orificio circular se adapta a la forma del callo para alojarlo evitando molestias y presiones.

Materialidad

Elaborado en su totalidad con aqua gel, que por sus características de elasticidad, suavidad y lubricación ayuda a proteger la piel de la fricción contra el calzado.

Tabla de tallas / Código de barras

U	7798162420622
---	---------------

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Retirar el producto a utilizar del film protector.
2. Ubicar el protector, centrando el orificio sobre el callo o la zona dolorida. El lado autoadhesivo debe ir sobre la piel.
3. Presionar el producto para adherirlo correctamente.
4. Acomodar hasta lograr su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender el uso del producto y consultar a un médico. El protector para callos debe adherirse a la piel, no al calzado. Producto no estéril, no utilizar directamente sobre heridas abiertas o zonas infectadas. Reemplazar cuando sea necesario, esto puede variar según la frecuencia de uso del producto. Los pies deben estar limpios y secos antes de su uso.

Envase	Bolsa plástica
Cantidad	6 unidades
Color	Transparente
NCM	3926.90.90
Peso sin envase	0,0065 kg.
Peso con envase	0,0083 kg.
Volumen con envase	
Industria/Origen	China

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar. Secar con toalla para quitar el exceso de agua. Almacenar en lugar protegido de la humedad.



Patologías

- \* Callosidades
- \* Laceraciones

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Uso sin prescripción.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global

Composición

100% Gel

Productos relacionados

PC-TC-TEA-TER-PD-PCH-PGL-OS-PT-SA-AD-DP-KP-TA-AG-AI-DG-JU-PM-STT